

Extubation Advisor – Guide en 7 étapes



1 Connexions

- Insérer le module de capnographie dans l'emplacement approprié du moniteur patient et placez le câble EtCO2 en ligne.
- Connecter la tablette/l'ordinateur portable avec EA au moniteur patient

2 Ouverture de session


- Lancez l'application EA et entrez le code PIN unique à 6 chiffres



3 Admettez un nouveau patient

- Utilisez « **Admission d'un nouveau patient dans la liste** » pour enregistrer un nouveau patient
- Une fois que le patient est admis, sélectionnez le patient la « **Sélection de la liste de patients** » et cliquez sur « **Réaliser l'ERS** » pour pouvoir entrer les données d'admission et les comorbidités (à effectuer une seule fois).
- Si le patient est déjà inscrit, sélectionnez son nom sous Liste des Patients pour continuer

NOTE : Vous pouvez aussi poursuivre vers l'ERS en sélectionnant l'onglet ERS (vous pourrez remplir les données d'admission pendant ou après l'ERS)

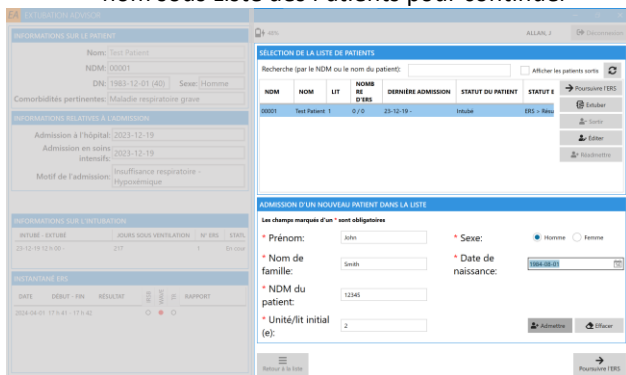

Admission Aptitude à l'extubation **ERS** Plus d'ERS

Complétez le formulaire ci-dessous avec les détails concernant l'admission du patient. Les ERS peuvent être exécutés avant la saisie de ces informations, mais ils doivent être terminés avant la génération du rapport final

INFORMATIONS RELATIVES À L'INTUBATION EN COURS

Date/heure de l'intubation en cours: 2024-07-20 10 h 00

Unité/lit actuels: 2

DATE ET MOTIF DE L'ADMISSION

Date d'admission à l'hôpital: Sélectionner une date [Aujourd'hui]

Date de l'admission en soins intensifs: Sélectionner une date [Aujourd'hui]

Motif de l'admission en soins intensifs:

- Choc
- Insuffisance respiratoire
- Post-opératoire
- Autre

COMORBIDITÉS PERTINENTES AU MOMENT DE L'ADMISSION

Maladie cardiaque: Oui Non Inconnu
définie comme au moins l'une de ces pathologies : maladie coronarienne, cardiomyopathie, maladie valvulaire, dysfonctionnement diastolique ou systolique connus

Maladie respiratoire: Oui Non Inconnu
définie comme au moins l'une de ces pathologies : BPCO, emphyseme, fibrose pulmonaire, asthme connus


Diabète: Insulinodépendance Hypoglycémiant oraux Régime contrôlé Non diabétique

Autre maladie grave: exclure RGO, HTN, HChol

Formulaire d'admission


4 Liste de contrôle de l'aptitude à l'extubation

- Complétez le formulaire sur **l'aptitude à l'extubation** (peut être effectué avant, pendant ou après l'ERS)

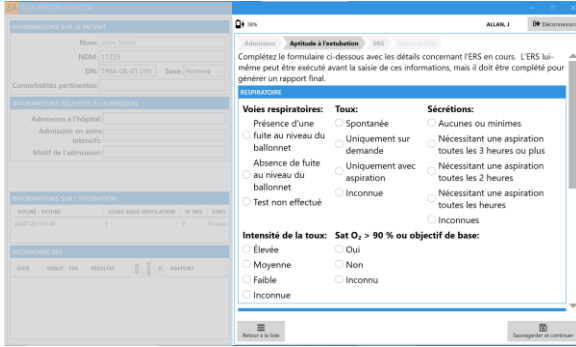

6 Résultat ERS


- Sélectionnez **Sauvegarder et continuer** pour accéder à l'onglet Résultat ERS
- **Complétez le résultat de l'ERS**—saisir la FR moyenne, le VC (mL) et donnez votre opinion sur le résultat de l'ERS et le risque d'échec à l'extubation
- Ensuite, sélectionnez **Générer un rapport**

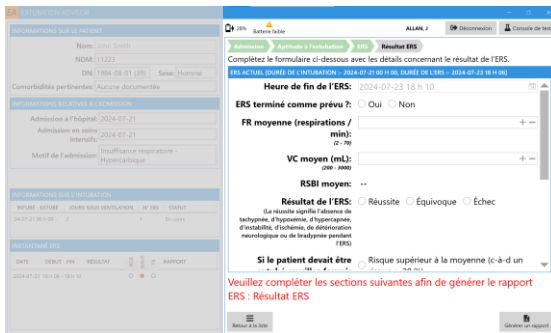

5 Effectuez l'ERS

- A) Documentez les paramètres de ventilation précédant l'ERS (AI, PEP, RASS)
- B) Vérifiez les connexions au moniteur
- C) Baissez les paramètres de ventilation pour l'ERS et **Démarrer l'enregistrement**
- D) Un enregistrement d'au moins 15 min est requis

À la fin de l'ERS, cliquez sur **Terminer l'enregistrement** et ajuster les paramètres de ventilation selon les normes de soins.

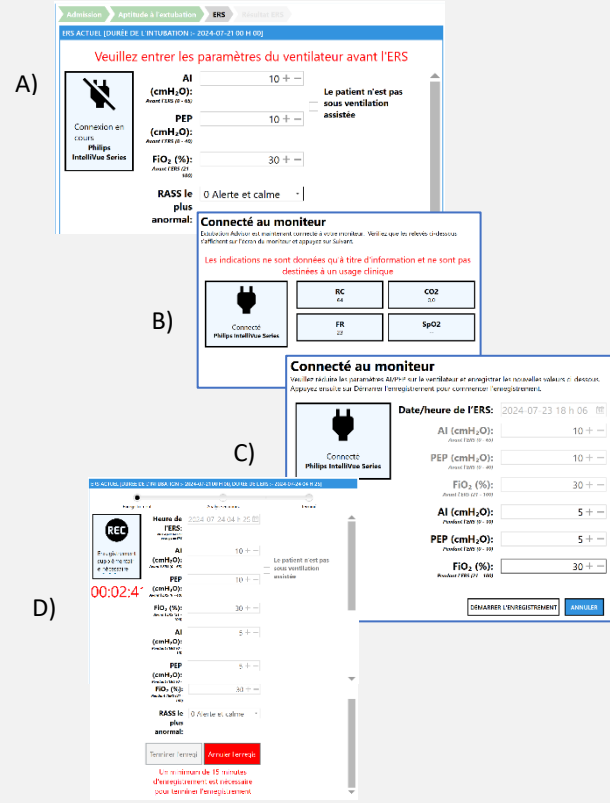

7 Générez un rapport d'ERS / Évaluer le rapport avec le médecin

- Vérifiez que tous les éléments du rapport sont corrects et **Sauvegardez** le rapport
- Pour imprimer un rapport, sélectionnez le dans la section **Instantané ERS** (en bas à gauche de l'écran d'accueil)
- Évaluez le rapport avec le médecin avant de prendre la décision d'extuber
- Fermer la session EA et la session d'ordinateur, nettoyez l'ordinateur portable (ou tablette), et retournez le à la borne de recharge

